



*dent*tech

*dent*folio

*die fast unsichtbare
folienapparatur*

einsatzbereich

- korrekturen von kleineren fehlerstellungen im frontbereich*
- finishing nach einer kieferorthopädischen behandlung*
- lückenschluss nach extraktion im frontbereich*
- behandlung von patienten mit metallunverträglichkeit*
- nur bei bleibender dentition*
- als provisorium einer prothetischen versorgung*

vorteile

- fast unsichtbar, metallfrei*
- mundhygiene in gewohnter weise*
- herausnehmbar*
- komfortabel - keine sprachbeeinträchtigung*
- gezieltes stripping*
- effizient*
- gut kalkulierbare kosten*


einfacher herstellungsprozess

erforderliche unterlagen

- 1. abdruck oberkiefer und unterkiefer
(jede 3. bis 4. schiene einen weiteren abdruck)*
- 2. ik wachsbiss*
- 3. behandlungsziel*
- 4. eventuell nachstripfen im verlauf der behandlung*

wir liefern ihnen

- falls gewünscht studienmodelle und ein set-up mit dem behandlungsziel*
- ungefähre behandlungszeit*
- detaillierte kostenschätzung*
- schleifplan*
- erstes behandlungsset*

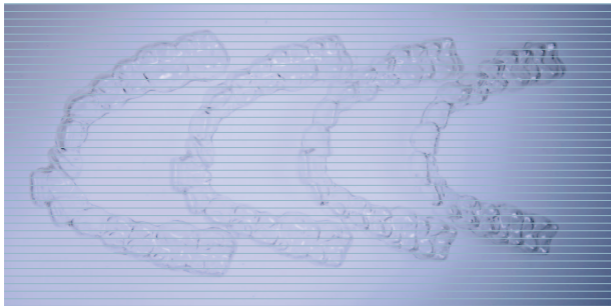

ablauf der behandlung

startschiene

0.2 bis 0.5mm bewegung

1-2 wochen tragzeit

2. schiene

bis 0.5mm bewegung

2-3 wochen tragzeit

ablauf der behandlung

3. schiene

bis 0.5mm bewegung

2-3 wochen tragzeit

eventuell eine weitere abformung

4. schiene

bis 0.5mm bewegung

2-3 wochen tragzeit

5. schiene

bis 0.5mm bewegung

2-3 wochen tragzeit

wenn das gewünschte ziel erreicht ist, sollte abschliessend eine retentionsschiene oder ein drahtretainer eingesetzt werden.

wenn das ziel nicht erreicht werden sollte, können weitere schienen erstellt werden.

zusammenfassend

nach abgeschlossener behandlungsplanung, liefern wir ihnen nach einer startschiene, weitere 2 bis 3 behandlungsschienen, welche jeweils 2 bis 3 wochen rund um die uhr getragen werden, ausser zum essen und für die zahnreinigung. jede neue schiene bewegt die zähne bis 0.5 mm, verursacht leichte spannungs-schmerzen und passt noch nicht ganz auf den zahnbogen.

die spannung verschwindet aber nach wenigen tagen, und die passgenauigkeit der folie wird täglich besser, sobald sie übereinpasst, kann die behandlung mit der neuen schiene fortgesetzt werden.

wenn das behandlungsziel erreicht ist wird eine retentionsschiene oder ein drahtretainer zur fixierung angebracht. von grösster wichtigkeit ist, wie bei allen abnehmbaren apparaturen, die mitarbeit des patienten.



denttech

denttech gmbh

untermüli 11

6300 zug

041-763 63 06

www.denttech.ch

denttech@denttech.ch